

らくしょう Zシリーズ

JIS T 9254

## 新しい背あげ機構・ラクリアモーションを搭載した、 パラマウントベッドの新しい楽匠Zシリーズです。

本カタログ掲載の楽匠Zシリーズは、適合するサイドレールおよびベッド用グリップとの組み合わせにおいて JIS 規格 (JIS T9254) の認証を取得しています。



POINT 1

### 身体がずれにくく、体圧を再分配 身体にやさしい起きあがり

背あげをするときのずり落ちを抑えて、体圧を床ずれリスクのもっとも高い仙骨部からお尻と太ももに移します。 安定した姿勢で起き上がることができ、床ずれリスクにも配慮した新しい背あげの方法です。



身体がずれないように、まず膝をあげ てから上体を起こしはじめます。



少し上体を起こしてから、ベッドが傾 き始めます。



ベッドが10°傾くと、さらに上体を起こ します。



上体を起こしながら膝を下げることで、 骨盤の立った姿勢で起きあがります。

POINT 2

#### 姿勢が崩れにくいから リラックスできて、動きやすい

膝を少し曲げて、足を下げた背あげ姿勢になるので、骨盤が 立って、安定した姿勢が維持しやすくなります。

※3モーションと2モーションでは、ラクリアモーションの動作が異なります。

背もたれに頼ることが少なく、首や肩、腕が動きやすくなります。

※3モーションと2モーション では. ラクリアモーションに よる背あげ姿勢が多少異な ります。



POINT 3

#### 足が下がっているから離床しやすい

新しい背あげ姿勢は、脚を持ち上げたりしなくても、ベッドの 外に足を降ろしやすくなっています。

また、ベッドの下のスペースも広いので、立ち上がるときに 十分に足を引くことができます。



POINT 4

#### 天井から生活空間へ視界が広がる

骨盤の立った背あげ姿勢がとれ、フットボード側が低くな るため、ベッドで過ごしているときに天井方向に向かいがち だった視線が生活空間に向きやすくなります。また身体が動 かしやすいので、視界も広がりやすくなります。



POINT 6

### 液晶画面スイッチを 全機種搭載

手元スイッチには、暗くても表示 が見やすいように白色液晶を使 用しています。

POINT 5

### 足元すっきり、もちろん介護もしやすい

ベッドの高さは最大で64.5cmまで上げることができるので、 腰に負担がかかりにくい姿勢で介護できます。

ベッドの下のスペースが広いので、踏み込んで接近しやすい 構造です。


※1モーションは高さ調節ができません。










#### ●共通サイズ表

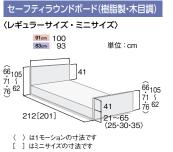

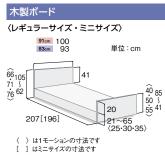

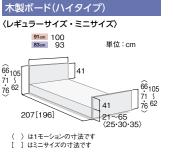

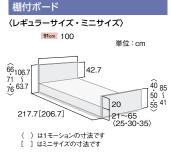

#### 楽匠Zシリーズ 専用オプション

### アクセスポート

#### パラマウントベッド


#### 立ちあがりや室内移動をサポート

立ち座りや移乗、立位保持・歩行補助など、さまざまな使い方に対応する楽匠Zシリーズ専用の手すりです。 楽匠Zシリーズのフレームに固定するので、安定感があります。







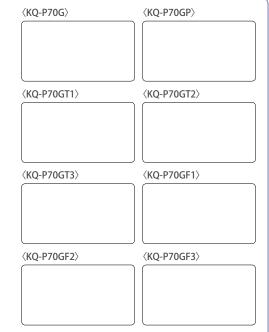

品名	型式	TAIS⊐-ド	セット内容
アクセスポート基本セット	KQ-P70G	00170-000795	アクセスポート基本セット×1
アクセスポート・垂直ポールセット	KQ-P70GP	00170-000796	アクセスポート基本セット×1+垂直ポール×1
アクセスポート・歩行用手すりセット 一連	KQ-P70GT1	00170-000797	アクセスポート基本セット×1+歩行用手すり×1
アクセスポート・歩行用手すりセット 二連	KQ-P70GT2	00170-000798	アクセスポート基本セット×1+歩行用手すり×2
アクセスポート・歩行用手すりセット 三連	KQ-P70GT3	00170-000799	アクセスポート基本セット×1+歩行用手すり×3
アクセスポート・ポール手すりセット 一連	KQ-P70GF1	00170-000800	アクセスポート基本セット×1+垂直ポール×1+歩行用手すり×1
アクセスポート・ポール手すりセット 二連	KQ-P70GF2	00170-000801	アクセスポート基本セット×1+垂直ポール×1+歩行用手すり×2
アクセスポート・ポール手すりセット 三連	KQ-P70GF3	00170-000802	アクセスポート基本セット×1+垂直ポール×1+歩行用手すり×3

品名	商品コード
アクセスポート基本セット	711100
垂直ポール	711105
歩行用手すり	711110

# 延長フレーム パラマウントベッド

ヘンシレ幅	坐式	回品コート	I AISJ-P
91cm幅	KQ-P72L	709225	00170-000793
83cm幅	KQ-P70L	709220	00170-000792

JIS認証取得

14cm長くなります

延長マットレスが別途、必要となります。	
延長マットレス	パラマウントベッド

ベッド幅	型式	商品コード	TAISコード
91cm幅	KE-551L	709203	00170-000563
83cm幅	KE-553L	709204	00170-000565

#### キャスター

#### 型式 商品コード TAISコード KQ-P70C **714065** 00170-000794

JIS認証取得 ベッドの高さが 約3cm高くなります。




パラマウントベッド

### 保険対応外商品

ホルダー	パラ	
型式	TAISコード	ı

	TAISJ-F 00170-000078				
	00170-000078				
IVポールホルダー					
商品コード	TAIS⊐ード				
718155	00170-000843				
	新品コード				



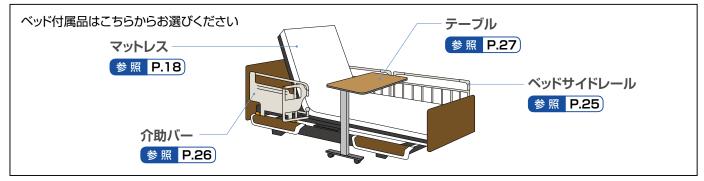

※ JIS認証取得 のマークのある製品は、楽匠Zシリーズとの組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。

15cm~55cm

楽匠 FeeZ

らくしょう フィーズシリーズ

# さらに安心感を高める"超"低床電動ベッド

独自の快適な背あげ機構に、超低床化による安全性と安心感をプラス

楽匠 FeeZ シリーズは、適合するサイドレールおよびベッド用グリップとの組み合わせにおいて JIS 規格(JIS T9254)の認証を取得しています。





99.9 95.5 55.5 207.3 41 95.5 55.5 単位:cm


### POINT 1

#### 15cmから55cmまで高さ調節が可能

最も低い状態で、ゆかからボトム上面までが 15cmの超低床設計。

ふとんからベッドに移行する際の違 和感が少なく、万一転落したときの 衝撃も緩和できます。

また、高さは最高で55cmまであげる ことができ、ベッドからの立ちあがり や介護にも配慮しています。

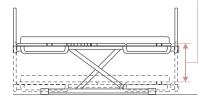



#### 快適な背あげ機構・らくらくモーション

手元スイッチの連動ボタンを操作する ことで、身体のずれと圧迫感を抑えな がら、安定した姿勢で起きあがること ができます。 ※3モーターのみ。



POINT 3

暗いところでも操作しやすい 白色液晶表示付き手元スイッチ

### 木製ボード 型式 商品コード 3モーター KQ-7833 702255 91cm幅 背上げ 膝上げ 00170-000893 高さ調節 ıt 👢 型式 商品コード ベッド幅 2モーター KQ-7733 702250 91cm幅 背上げる言さ調節 TAISコード 00170-000892

#### 楽匠 FeeZシリーズ 専用オプション



※ JIS認証取得 のマークのある製品は、楽匠FeeZシリーズとの組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。

#### Q-AURA (クオラ)

パラマウントベッド









#### 高い安全性と確かな機能を併せ持つ電動介護用ベッド

Q-AURA (クオラ) は、適合するサイドレールおよびベッド用グリップとの組み合わせにおいてJIS規格 (JIS T9254) の認証を取得しています。




#### こだわりの品質

#### 安心安全への徹底したこだわり

安心してお使いいただくにはボトムの強度が重要。 鋼板をプレスしてねじれをつけて、医療現場での 使用にも耐える強度を実現しました。



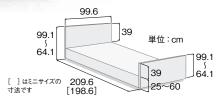


#### 使いやすさ

#### 自立動作を支援し転倒を予防する伝い歩きボード

ボード上部にグリップを設けることで、伝い歩きをサポート。 また、ボードは簡単に取り外しが可能で、取り付ける時には


ボードストッパーをかける ことができる安心設計です。

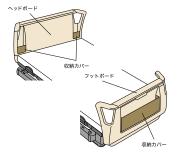

#### 最低床高 25cm~最高床高 60cmまでの 高さ調節機構

#### 最高床高は60cm。


介護する方の腰の負担を抑えることができます。 床からボトム上面までの最低床高は25cm。 比較的小柄な方でもかかとが接地でき、 より多くの方が安定した端座位をとれます。

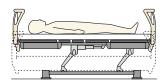

#### 液晶付手元スイッチ

液晶に角度・高さが表示される ので、使いやすい角度や高さに、 誰もが同じように調節することが できます。



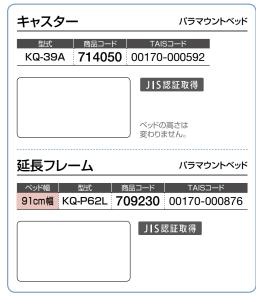

※ JIS認証取得 のマークのある製品は、Q-AURA (クオラ)との組み合わせにおいてJIS認証を取得しております。

楽匠Sシリーズ パラマウントベッド

#### インテリア性を重視した高級感のある木製ボード

単位:cm

20~65

40

20

ゆとりの100cm幅 ワイドサイズ

109

203


104









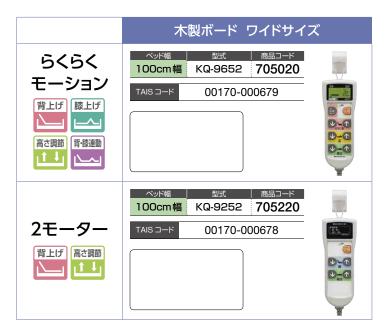

※延長フレーム・キャスター・ハイトスペーサーもご用意しております。

#### 購入

### -キング3点セット (制菌)

パラマウントベッド

型式	商品コード	希望小売価格
KZ-639005(100cm幅)	203372-10	17,820円 税抜 16,500円
KZ-639003(91cm幅)	203371-30	16,200円 税抜 15,000円
KZ-639001 (83cm幅)	203371-10	16,200円 税抜 15,000円
KZ-639004(91cm幅 mini)	203371-40	16,200円 税抜 15,000円
KZ-639002(83cm幅 mini)	203371-20	16,200円 税抜 15,000円

介護用ベッドに合わせたマットレスパッド、ボックスシーツ、ピローケースのセット いずれも制菌加工を施して衛生面にも配慮しています

いずれも 洗濯可・抗菌

側地/ポリエステル65%、綿35% 詰め物/ポリエステル100%(うち30%エスメーロ) ※四隅ゴム付き、洗濯ネット付き

### ボックスシーツ

側地/ポリエステル65%(制菌加工)、綿35% ※ボックスシーツは、厚さ7~15cmのマットレスに対応

側地/ポリエステル65%(制菌加工)、綿35% ※ピローケースは、一般的な枕のサイズ43×63cmに適合



## 購入

スマートフィットピロー

パラマウントベッド

工型 型式		商品コード	希望小売価格
ハイタイプ	RE-ZC038H	240340	21,060円 税抜 19,500円
ロータイプ	RE-ZC038L	240341	21,060円 税抜 19,500円
スーパーロータイプ	RE-ZC038SL	240342	21,060円 税抜 19,500円

●サイズ:ハイタイプ/幅80×長さ43×高さ9.1~10.5cm ロータイプ/幅80×長さ43×高さ8.1~9.5cm スーパーロータイプ/幅80 imes長さ43 imes高さ $7.1\sim8.5$ cm

自然な寝返りをお手伝いする枕・スマートフィットピローで、 良質な睡眠を手に入れてください

#### こんな方に使ってほしい

- なかなか寝付けない方
- ●寝返りのたびに、目が覚めてしまう方
- 朝起きたときに、首や肩に違和感の



# 特殊寝台(電動ベッド) 電動ベッドは、起き上がり・離床などの動作を助け、「寝たきりの生活」を防止するために用います。

### 利用者状態別選定ポイント



床上(布団)からの立ち上がりも可能ですが、手 すりなどの支持物が必要となります。ベッドでは、 自力で寝返りをし起き上がることは可能ですが、 寝返りする際に介助バーなどの支持物が必要と なることがあります。



ベッドから起き上がるために、背上げ機能を使用 し、支持物を使用して座位へ自力もしくは介護で 移行する方です。臥床時の姿勢安定のため膝上 げ機能、移乗や介護のためにベッドの高さ調整 機能が必要です。

A B C D E このマークを目安に選べます。



床上(布団)からの立ち上がりは自力では不可能 な方です。ベッドからは介助バーなど支持物を使 用し、自力で寝返り、足を下ろし起き上がります。 移乗のためにベッドの高さ調節が必要です。



ベッド上座位時に身体がズレないように背上げ 機能、膝上げ機能が必要な方です。介護や移乗 のためにベッドの高さ調整機能が必要です。

### 電動ベッドの機能

#### 背上げ機能





起き上がりの動作 を助けます。

### 膝上げ機能





背上げするときに 体がずれてしまうの を防ぎます。

### 高さ調節機能



高さ調節

ベッドの床高を立ち 上がりやすい高さ に変え、立ち上がり の動作を助けます。

介護する方も楽な姿勢が取れるので、 負担が軽減されます。

### 背·膝連動機能



背と膝の上げ下げ を組み合わせるこ とで、からだのずれ や圧迫感が少なく、 姿勢のずれにくい 起き上がり動作が できます。

### ラクリアモーション

### 楽匠乙

2005年









従来の背と膝の上げ下げを組み合 わせた動きに、ベッド全体を傾かせ る動きを加えることで、床ずれの 発生要因となる起きあがり時の身 体のずれや圧迫感を大幅に軽減す るとともに、起きあがり後の姿勢を しっかりと保持します。

### らくらくモーション



ひとつのボタン操作で、からだがズ レにくく、安定した姿勢で起き上が ることができます。背上げをしたあ とに介護する方が姿勢を直す負担 を軽減できます。

#### 介護用ベッド 製品開発の変遷

1995年



1990年

初代楽匠 KQ-803 (1993)

### キューマアウラベッド (1997)





アウラ21 (1999)

2000年



新楽匠(2003) 在宅も低床化へ らくらく(KIND)モーション搭載 デザイン一新 見守り用通信機能搭載



楽匠Sシリーズ (2009)介護用ベッド初JISマーク製品

高剛性を実現

2010年

楽匠Zシリーズ (2014)ラクリアモーション、 初搭載



10


# 電動ベッドのサイズ ■幅

#### 83cm




接近しやすく介護 がしやすい。

#### 91cm

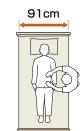


ゆったりとしたス ペースと介護のし やすさを両立。

#### 100cm

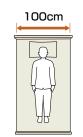


大柄の方でも充分に 寝返りができるゆった りとしたスペース。


#### ■長さ

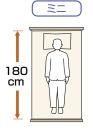

適応身長の目安 150cm未満

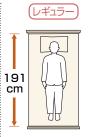


適応身長の目安 150cm以上

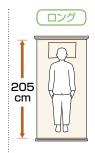

適応身長の目安 170cm後半から ※ロングサイズは、レギュラー サイズのベッドと延長フレー ムの組み合わせです。

## 各部名称とベッド付属品

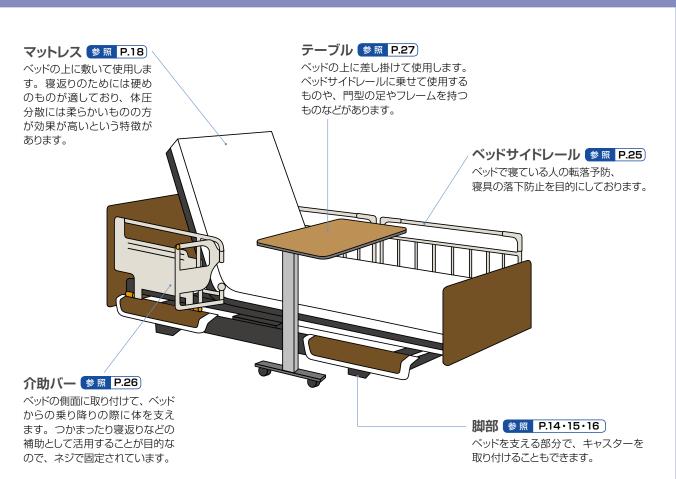

### 在宅用電動介護用ベッドのJISマークについて

● マークのある特殊寝台(電動ベッド)は、柵(ベッドサイドレール)などの適合 するオプション製品を取り付けたときにできる"すき間"について JIS 規格に定められた 寸法を順守しています。組み合わせについては必ずその商品に適合するオプション製品 (ベッドサイドレールなど) をお使いください。

